

今、できる事からはじめよう! おうちでできるセルフ・ヘルスケア

ご存知ですか? “自宅”でできる がんリスク検査

★池上彰と林修が学ぶ
「日本の最新医療の今」で取り上げられました



だ液によるがんリスク検査 SalivaChecker®

サリバテックが、Web直販で26,400円で提供している検査を

特別価格 **12,100円(税込)**で受検できます

\\ サリバチェッカー
おすすめの理由 //

どうしてだ液でがんのリスクが分かるの?

一度に複数のがんリスクが分かる!



自分も家族も安心

早期発見ができれば治療の負担も少なく、家族も安心です。



痛くない

数滴のだ液を採取するだけなので、体に負担をかけません。




確かな臨床研究

検査技術の基礎となった研究は、多くの論文が国際的な学術誌に掲載されています。



がん細胞からしみ出す 代謝物がだ液に表れるからです。

だ液は「身体の鏡」といわれ、血液や尿と同じように健康状態の指標となる多くの情報を含みます。だ液中の成分の大部分は血液由来のため、がん細胞からしみ出す代謝物は血管を通り、だ液中にしみ出します。サリバチェッカーは、最新の測定装置を用いてこれらの物質を分析・解析します。

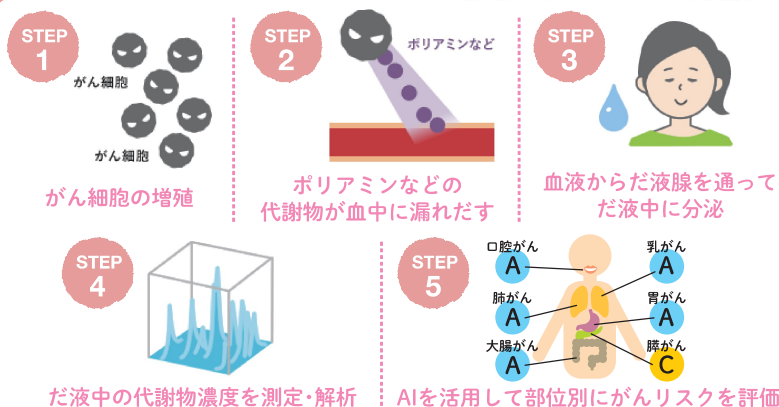

サリバチェッカーは、慶應義塾大学先端生命科学研究soでの研究成果をもとに開発された新しい検査です。検査のしくみやリスク評価方法については、サリバテックのホームページに詳しく掲載しています。

Check! ➡



検査の流れ



だ液の採取手順は
動画でも確認できます！



01 検査の申し込み

下記のお申込方法・注意事項をご確認の上、お申込みを行ってください。

02 検査キットが自宅に届く



お申し込み後キットが届きます。キットを冷凍庫で3時間以上冷凍させます。※内包の保冷剤は固まらないタイプです。

03 だ液を少量とって送る



だ液を採取します。採取時間は2〜5分程度です。採取後、冷凍庫で凍らせた上で、箱に入れ、冷凍便で返送します。


04 分析・検査

だ液中のがん特有の代謝物質の濃度を分析することで、がんのリスクを調べます。



05 検査結果

だ液が検査所に到着してから約1ヶ月以内に検査結果を郵送します。

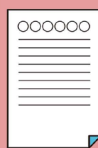

06 検査を受けた後は

がんのリスク値が高い場合は、かかりつけ医またはサリバテック社提携の医療機関に相談されることをお勧めします。



サリバテックWeb直販で26,400円(税込)で提供の検査を、**特別価格の12,100円(税込)**で受検することができます。

<申込概要>

対象者：北海道税理士協同組合 組合員・賛助会員および職員ならびに同居の親族さま

申込URL：右の該当する支部をご確認のうえ、QRコードからお申込みください



札幌西支部・函館支部・苫小牧支部・室蘭支部
各支部に所属の組合員・賛助会員および職員ならびに同居の親族さま

札幌中支部・札幌東支部

各支部に所属の組合員・賛助会員および職員ならびに同居の親族さま



札幌北支部・札幌南支部・小樽支部・旭川支部・岩見沢支部・滝川支部
各支部に所属の組合員・賛助会員および職員ならびに同居の親族さま

北見支部・釧路支部・帯広支部

各支部に所属の組合員・賛助会員および職員ならびに同居の親族さま



◆「MYひまわり」の登録について

本検査は、SOMPOひまわり生命の紹介により、割安な価格で利用提供しています。サリバテック申込画面で、同社運用のマイページ「MYひまわり」への登録をおすすめしていますので、ご希望でしたらチェックください。(「MYひまわり」については、画面内のリンクページを参照ください。)

○「MYひまわり」登録希望者へは、申込の1〜2週間後に登録完了の案内が送られます。初回ログイン時のパスワードは「Password1」です(ログイン後変更ください)。

※メールアドレスが申込画面に正しく入力されていない場合は登録されないで、ご了承ください。

<注意事項>

- 本検査は遺伝的検査のように将来的な罹患リスクを調べるものではなく、**今現在、がん罹患している可能性を調べる検査**です。また本検査により得られる情報は医師の診断に代わるものではありません。
- 実施前日から食事制限などの事前注意事項がございます。
- 本検査はだ液を凍結させ、**冷凍クール便で返送いただきます**。(着払い伝票を同梱しております)
- 本検査結果(リスクの高/低)を問わず、身体に何らかの自覚症状がある場合は、速やかに医療機関を受診ください。
- 採取キット提出期限は、キット到着から6か月です。

(検査キット開発元/検査・測定機関)

SalivaTech

株式会社サリバテック

住所/山形県鶴岡市覚岸寺字水上 246 番地 2

【商品トラブル、不具合の場合】検査キットに瑕疵がある場合、弊社負担で交換を承ります。また、お客様都合による返品はお受けできません。

【その他の注意事項】 ●海外発送は行っておりません。●沖縄・離島はサービス対象外となります。●時間指定はできません。●弊社より発送前に限り、検査のキャンセルが可能です。サリバテックのホームページよりご連絡ください。●宅配ボックス完備のマンション・アパートにお住まいの際には、宅配ボックスにお届けさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ】

